

Le **Beauty Gun** intègre la dernière technologie de traitement visage et corps en utilisant le procédé de la **Ionophorèse**.

**Breveté mondialement** cette technologie non invasive permet une meilleure diffusion d'actifs dans la peau grâce à la ionisation des produits (serums) diffusés par un roller en carbone.

### Le **Beauty Gun** intègre 3 programmes

**1/ IONISATION** : courant continu négatif ou positif

**2/ IONISATION + STIM GALVA** : courant continu négatif couplé à un courant biphasique à la fréquence de 2.5 Hz

**3/ STIMULATION** : courant biphasique à la fréquence réglable de 1 à 500 Hz

### Traitements proposés avec le **Beauty Gun**

#### 1/ IONISATION

- Nettoyage de peau par Saponification
- Traitement de l'acné

#### 2/ IONISATION + STIM GALVA

- Soins Anti-âge
- Soins Anti-tâches
- Rajeunissement du contour de l'œil
- Comblement des rides
- Traitement de la cellulite
- Désengorgement des tissus

#### 3/ STIMULATION


- Fermeté
- Effet tenseur sur l'ovale du visage



## Processus généré par I-Beauty Gun

Ionisation par  
I-Beauty Gun

Ionisation de  
solutions esthétiques  
acides ou basiques

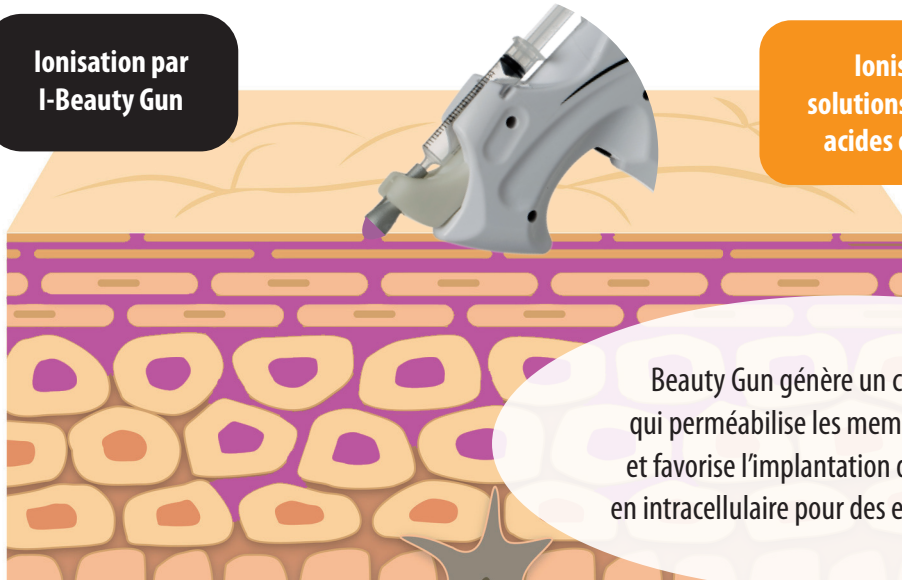

Beauty Gun génère un courant ionisant qui perméabilise les membranes cellulaires et favorise l'implantation des produits actifs en intracellulaire pour des effets plus durables.

**Une efficacité prouvée** qui permet une meilleure absorption sur l'ensemble des couches de la peau.

**Un résultat visible** immédiatement et plus longtemps.

## Exemple d'une des actions du **Beauty Gun**

Il permet de saponifier (transformer en savon) les matières grasses qui se trouvent à la surface de la peau afin de les éliminer.

Une réaction chimique se produit entre les éléments suivants :

Le sébum de la peau et l'eau salée (sérum physiologique)

Le courant continu décomposera le sel en deux éléments ioniques et l'eau va également se dissocier sous l'effet du courant électrique.

Les ions positifs étant toujours attirés par les ions négatifs, ils vont s'associer pour former ce qui n'est autre que la formule de la soude caustique.

Or la soude caustique, au contact du sébum de la peau va former un savon :

il s'agit là de la réaction de **saponification**.



## Points forts de cette Nouvelle Solution Esthétique

### Pour l'institut

- Une nouvelle dynamique active
  - Une valorisation de l'image d'un centre expert beauté
  - Augmentation du CA/ heure
  - Fidélisation de la clientèle (cure)
  - Complète vos soins traditionnels
  - Mobilité de cabine en cabine
  - Facilité d'utilisation
  - 90% des produits sont admissibles (serums)
  - Autonomie importante (15 h sur batterie), fonctionne aussi sur secteur
  - Conviviale grâce à son écran couleur et une gestion tactile des commandes
  - Ergonomie, maniabilité et légèreté du Beauty gun adapté à un usage fréquent
  - 3 Rollers de tailles différentes pour travailler sur toutes les zones du visage et du corps
  - Hygiène respectée
- 

### Pour le client

- Un résultat visible instantanément
- Un soin indolore
- Cure 5 séances
- Soin nouveau et efficace
- Résultat instantané et continu

## Caractéristiques techniques

- Type de courant : Biphase ou continu
- Nombre de programmes : 6
- Plage de fréquence de 1 à 500Hz
- Mise en veille automatique après 4 minutes
- Détection absence d'électrode ou de contact
- Indicateur de puissance : 15 niveaux
- Indicateur du niveau de charge de la batterie
- Indicateur des programmes visibles à l'écran
- Dimensions (L x H x P) : 29x16x6 cm
- Poids : 450 grammes
- Batterie type : Li-ion
- Autonomie : 20 heures
- Durée de charge : 1 heure
- Type de seringue : 1 à 5 ml



9 impasse le petit Colombier, 26800 Étoile sur Rhône - France - Tél : +33 967 208 521 - Mail : [contact@nextstepspa.com](mailto:contact@nextstepspa.com)

[www.nextstepspa.com](http://www.nextstepspa.com)



# Beauty Gun

La technologie qui réveille la Peau en la respectant

